

COVID-19 Raccomandazioni per pulizia e disinfezione dei tiralatte Symphony a noleggio

Il virus causa del COVID-19 e altri coronavirus umani endemici (HCoV) può persistere su superfici come metallo, vetro o plastica per un massimo di 3 giorni, ma è possibile impedirne la trasmissione con la pulizia e l'uso del disinfettante.

Medela aderisce ai più elevati standard di igiene e sicurezza per salvaguardare dalla diffusione di agenti patogeni tra utenti.

Raccomandazioni pulizia e disinfezione

Passo 1

Solo il personale autorizzato può accedere all'area di pulizia e manutenzione.






Passo 2

Tutto il personale deve attenersi a una rigorosa igiene delle mani prima di entrare e uscire dall'area designata lavandosi regolarmente le mani per almeno 20 secondi e usando un disinfettante per le mani.

Passo 3

Tutto il personale incaricato di pulire, decontaminare e riparare i tiralatte restituiti deve indossare dispositivi di protezione individuale (DPI).

Quali dispositivi di protezione individuale devono essere indossati?

Misura		Ratio
Cambiare indumenti e scarpe in abiti da lavoro, indossare scarpe designate per l'area		Il carico microbico può essere trasmesso su indumenti e scarpe
Lavarsi regolarmente le mani con acqua calda e sapone per almeno 20 secondi. Asciugare con un tovagliolo di carta pulito usa e getta. Usa un disinfettante per le mani dopo aver lavato le mani.		Il disinfettante per le mani deve essere usato solo su mani pulite
Indossare un grembiule protettivo sugli indumenti		Per ridurre al minimo gli schizzi e proteggere gli indumenti
Applicare occhiali protettivi / visiera per il viso		Per ridurre al minimo gli schizzi dalla pulizia ed evitare gli schizzi di disinfettante negli occhi e negli occhiali
Indossare guanti monouso non sterili, non in lattice		Assicurarsi che tutte le escoriazioni siano coperte con una medicazione impermeabile. Ulteriore strato protettivo contro l'agente disinfettante e qualsiasi potenziale carico microbiologico.


Pulizia e disinfezione dei tiralatte restituiti per riparazione / assistenza

Per pulire – pulire il tiralatte con un panno pulito e umido (non bagnato). Utilizzare acqua potabile e un detergente liquido non abrasivo. Lasciare riposare per 5 minuti e lasciare asciugare all'aria.

Per disinfettare - pulire l'alloggiamento del tiralatte con un panno pulito e umido. È possibile utilizzare un disinfettante a base di alcol (min. 70% di alcol). Lasciare riposare per 5 minuti e lasciare asciugare all'aria.

Un elenco di disinfettanti approvati per Symphony e dimostratisi efficaci contro SARS-CoV-2 secondo i loro produttori è disponibile sulla pagina web di Medela dedicata al COVID-19 <https://www.medela.it/covid-19>


Raccomandazioni pulizia e disinfezione

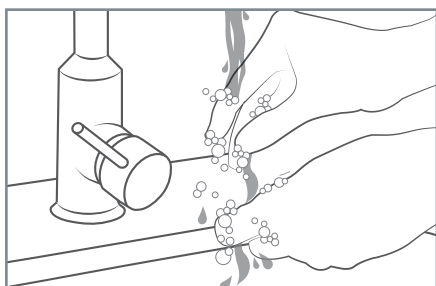


1. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi con sapone e acqua calda. Asciugare guanti e DPI.



2. Pulire l'esterno e l'interno della custodia con un detergente. Lasciare riposare per 5 minuti e lasciare asciugare all'aria.

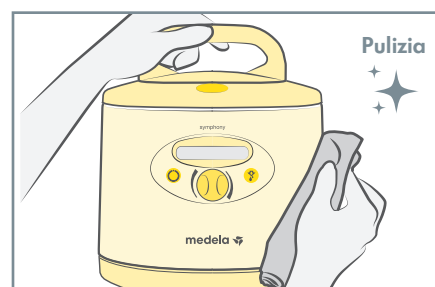


3. Pulire le superfici esterne del tiralatte con un detergente. Lasciare riposare per 5 minuti e lasciare asciugare all'aria.

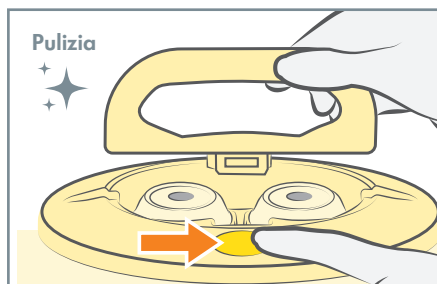


4. Con un panno umido, pulire accuratamente la maniglia e il coperchio. Pulire a fondo il pulsante e l'area interna.




5. Pulire accuratamente con un panno umido avendo cura di pulire i pulsanti del display e la manopola di controllo.

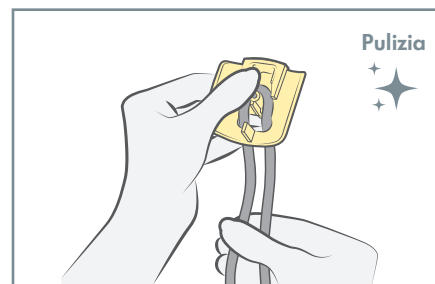


6. Pulire accuratamente il cavo elettrico con un panno umido.

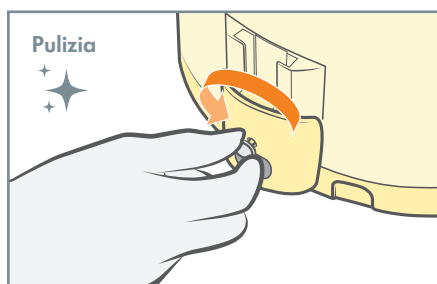

7. Rimuovere la protezione della scheda e la scheda. Pulire entrambi con un panno umido.

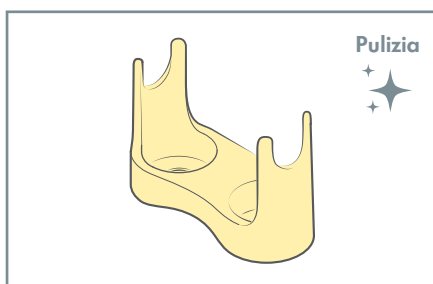

8. Rimuovere e posizionare il supporto per bottiglie in acqua calda e detergente, lavare, risciacquare e asciugare.

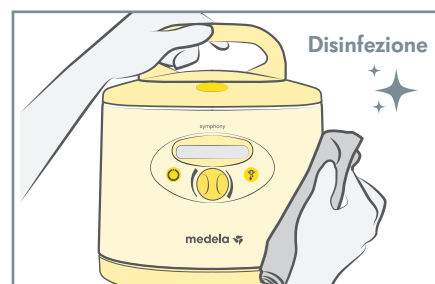

9. Disinfettare con una salvietta igienizzante o un detergente disinfettante approvato. Lasciare asciugare all'aria. Seguire i passaggi 2-8 per disinfettare la custodia, il tiralatte, il cavo e il supporto per bottiglie.

Togliere i guanti secondo la guida DPI. Lavarsi immediatamente le mani. Gettare panni, salviette e guanti usati in un sacchetto di plastica e sigillarli o chiuderli in busta doppia e smaltirli quotidianamente.